

# COJINES Y RESPALDOS JAY





# Superior Clinical Seating

Jay – El líder en Sedestación y Posicionamiento

Efectividad y facilidad de uso son prioridades.

En Jay tenemos en cuenta hasta el último detalle. Por eso, la amplia gama ofrece diferentes soluciones para cada necesidad clínica.

El resultado es una “obra de arte tecnológica”.

Jay, combinación de estabilidad, distribución de presión, facilidad de uso y confort al más alto nivel.

| Confort                                                                                               | Integridad de la piel                                                                                  | Integridad de la piel y Posicionamiento                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Basic</p>         | <p>Easy Fluid</p>     | <p>Jay Balance</p>  |
| <p>Soft Combi P</p>  | <p>Xtreme Active</p>  | <p>Jay 3</p>        |
| <p>Easy Visco</p>    |                                                                                                        | <p>Jay 2</p>        |
| <p>Jay Zip</p>      | <p>Care</p>           | <p>GS</p>           |
|                                                                                                       | <p>Lite</p>          | <p>Fit</p>         |

## Gama de cojines Jay

|                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alta                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | <div>Integridad de la piel &amp; Posicionamiento</div> <div>Espuma y Fluido/Aire</div> <div><div>■ Balance</div><div>■ Jay GS</div><div>■ Jay 3</div><div>■ Jay Fit</div><div>■ Jay 2</div></div> |
|                                  |                                                                                                                                    | <div>Integridad de la piel</div> <div>Espuma y Fluido</div> <div><div>■ Easy Fluid</div><div>■ Xtreme Active</div><div>■ Care</div><div>■ Lite</div></div> |                                                                                                                                                                                                   |
|                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| moderada                         |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| bajo                             | <div>Confort</div> <div>Espuma</div> <div><div>■ Basic</div><div>■ Soft Combi P</div><div>■ Easy Visco</div><div>■ Zip</div></div> |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| <div>Protección de la piel</div> |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| <div>Posicionamiento</div>       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
| <div>bajomoderaoalto</div>       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |

# Gama de Cojines y Respaldos JAY

## Confort

|                     |                                                                              |    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Basic</b>        | Confort de larga duración                                                    | 7  |
| <b>Soft Combi P</b> | Estabilidad de larga duración                                                | 8  |
| <b>Easy Visco</b>   | Alto nivel de confort con estabilidad                                        | 9  |
| <b>Zip</b>          | Protección de la piel, confort y estabilidad en cojín práctico y conveniente | 10 |

## Integridad de la piel

|                      |                                                           |    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| <b>Easy Fluid</b>    | Integridad de la piel con estabilidad                     | 11 |
| <b>Xtreme Active</b> | Protección de la piel y estabilidad para usuarios activos | 12 |
| <b>Care</b>          | Postura y protección antiescaras en geriatría             | 13 |
| <b>Lite</b>          | Extremadamente ligero, función microclimática superior    | 14 |

## Integridad de la piel y Posicionamiento

|                          |                                                                     |         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Jay Balance</b>       | El equilibrio perfecto entre protección de la piel y estabilidad    | 15 - 18 |
| <b>Jay 3 /Jay 3 Prof</b> | Opción superior para necesidades complejas                          | 19 - 22 |
| <b>Jay 2 /Jay 2 Prof</b> | Estabilidad y posicionamiento con alta protección antiescaras       | 23 - 24 |
| <b>Jay Gs</b>            | Estabilidad, posicionamiento y crecimiento del usuario pediátrico   | 25      |
| <b>Jay Fit</b>           | Soporte extra y abducción de caderas                                | 26      |
| <b>Jay 2 Plus</b>        | Protección antiescaras y posicionamiento para el usuario bariátrico | 27      |

## Respaldos

|                              |                                                                                                |         |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Jay 3</b>                 | Amplia gama de respaldos con diferentes opciones de soporte lateral y posterior                | 32 - 41 |
| <b>Jay 3 Carbono</b>         | Todas las ventajas de un respaldo rígido pero increíblemente más ligero y con mucho estilo     | 43 - 45 |
| <b>Jay 3 Termorregulador</b> | Tecnología termorreguladora integrada                                                          | 46 - 47 |
| <b>Jay Easy</b>              | La solución más sencilla para ofrecer confort y un soporte eficiente                           | 48-49   |
| <b>Jay Fit</b>               | Múltiples posibilidades de posicionamiento y crecimiento                                       | 50-51   |
| <b>Jay Zip</b>               | Solución ultra-ligera para el usuario pediátrico. Ajustable y muy fácil de instalar y retirar. | 52      |
| <b>Jay Care</b>              | Indicado en geriatría                                                                          | 53      |



## Basic

Confort de larga duración

### Características:

- Base de espuma contorneada para facilitar el alineamiento corporal y maximizar la superficie de contacto.
- Espuma moldeada de larga duración que proporciona estabilidad lateral y posterior leve.
- Superficie de espuma suave y contorneada para mayor confort.
- Base con forma para un óptimo acoplamiento del cojín a la tapicería standard de la silla.
- Funda resistente a la incontinencia.



### Indicaciones clínicas:

- Paciente que requiere confort con mínimo soporte postural, posturas simétricas.
- Paciente con riesgo bajo de úlceras por presión o fricción. Buena integridad de la piel.
- Pacientes que pueden realizar cambios de peso de manera autónoma.
- Usuarios esporádicos de sillas de ruedas.
- Peso máx usuario: 113 kg.

***“Confort para el usuario y larga vida útil del cojín”***



Base sólida de madera




Base de espuma moldeada

### Tallas de cojín JAY® Basic (42 tallas)

| Prof. | Anchura de cojín |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| cm    | 25               | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |
| 25    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60    |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Altura (en cm) |         |
|----------------|---------|
| Frontal        | Trasera |
| 4 cm           | 4 cm    |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Peso cojín 40 x 40 cm | 0,7 kg |
| Peso máx. usuario     | 113 kg |
| Garantía              | 2 años |

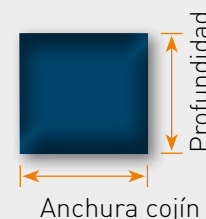

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

# Soft Combi P

Estabilidad de larga duración

## Características:

- Espuma pintada, resistente y de larga duración
- Base firme y contorneada que aumenta la superficie de contacto protegiendo la sedestación prolongada
- El mayor contorno de la base incrementa la estabilidad antero-posterior y lateral.
- Funda resistente a la incontinencia
- Base plana (para usar con asiento firme)
- Opción de base sólida de madera para tapicería standard



## Indicaciones clínicas:

- Diseñado para pacientes con postura simétrica o levemente asimétrica que necesitan soporte postural moderado
- Pacientes con riesgo bajo de úlceras por presión
- Pacientes que pueden realizar cambios de peso de manera autónoma
- Peso máx usuario: 150 kg

### "Confort y estabilidad"



Base sólida de madera




Base contorneada y resistente a la incontinencia

## Tallas de cojín JAY® Soft Combi P (42 tallas)

| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| cm    | 25            | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |
| 25    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Altura (en cm) |         |
|----------------|---------|
| Frontal        | Trasera |
| 5 cm           | 4 cm    |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Peso cojín 40 x 40cm | 0.8 kg |
| Peso máx. usuario    | 150 kg |
| Garantía             | 5 años |

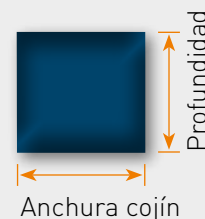

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

## Easy Visco

Alto nivel de confort con estabilidad

### Características:

- Base de espuma ligera y moldeada para soporte postural moderado.
- Viscoelástico en hondonada pélvica para mayor protección antiescaras: inmersión de las tuberosidades isquiáticas de 2 a 3 cm.
- Cortes laterales traseros para óptimo ajuste a los tubos de la silla.
- Corte trasero central para alivio de presión en sacro/ coccix y aumento de confort
- Opción de base plana (para asientos firmes) o curva (para sillas con tapicería)
- Funda resistente a la incontinencia de serie. Opción de funda microclimática como recambio
- Base sólida de madera (opcional)



### Indicaciones clínicas:

- Paciente con postura simétrica o asimétrica leve que requiere soporte postural moderado.
- Pacientes con riesgo moderado de úlceras por presión
- Soporte a nivel de fémur y trocánteres para estabilidad pélvica lateral y antero-posterior
- Pacientes que pueden realizar cambios de peso de manera autónoma
- Peso máx usuario: 150 kg

**“Alto confort y estabilidad con protección moderada”**



Base sólida de madera



Base contorneada con hondonada pélvica VISCO

### Tallas de cojín JAY® Easy Visco


| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| cm    | 25            | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |
| 25    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 52    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

■ Sólo con base curva

#### Altura (en cm)

| Frontal | Trasera |
|---------|---------|
| 5,5 cm  | 5,5 cm  |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Peso cojín 40 x 40 cm | 1,06 kg |
| Peso máx. usuario     | 150 kg  |
| Garantía              | 2 años  |

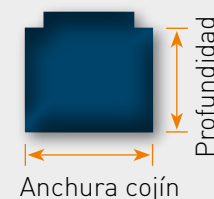

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

# Zip / Pediátrico

Protección de la piel, confort y estabilidad en cojín práctico y conveniente

## Características:

- Base de espuma de doble capa (Viscool™ en la capa superior para mayor protección antiescaras)
- El contorno del cojín optimiza la estabilidad lateral y anteroposterior del niño
- Funda interior de lycra flexible y poliuretano, muy fácil de limpiar. Con tecnología Aquaguard™ y diseño especial en la cremallera, totalmente impermeable.
- Funda exterior suave y flexible, con filamentos de plata incrustados en el tejido para inhibir la proliferación de bacterias (Tecnología X-static®) y material microclimático 3DX™ que favorece la ventilación y disipa el calor y la humedad.

## Indicaciones clínicas:

- Diseñado para usuarios pediátricos con necesidad de confort y soporte postural medio.
- Pacientes con riesgo moderado de desarrollar úlceras por presión
- Pacientes que pueden realizar cambios de peso de manera autónoma
- Peso máx usuario: 75 kg

**“Diseñado para adaptarse a las necesidades específicas del usuario pediátrico”**



X-static  
SILVER SYSTEMS™



Opción de color en la funda




Base de espuma de 2 capas

## Tallas de cojín JAY® Zip (52 tallas)

| Prof | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| cm   | 20            | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 20   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 22   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 24   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 26   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 28   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 30   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 32   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 34   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46   |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Altura (en cm) |         |
|----------------|---------|
| Frontal        | Trasera |
| 5 cm           | 4,5 cm  |

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Peso cojín 30 x 30cm | 0,54 kg |
| Peso máx. usuario    | 75 kg   |
| Garantía             | 2 años  |

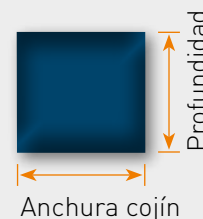

Para referencias, opciones y accesorios, por favor consulte la hoja de pedido.

## Easy Fluid

Integridad de la piel con estabilidad

### Características:

- Espuma ligera y contorneada
- Cortes laterales traseros para ajuste a los tubos del respaldo y corte trasero central para alivio de presión en coccix
- Bolsa de fluido Jay incorporada en la funda del cojín para protección antiescaras: inmersión de hasta 4 cm de las tuberosidades isquiáticas
- Aumento de la superficie de contacto gracias a la adaptación del fluido Jay, a la espuma flexible y contorneada que protegen la zona isquiática
- Opción de base plana (para asientos firmes) o curva (para sillas con tapicería)
- Funda resistente a la incontinencia de serie. Opción de funda microclimática como recambio
- Base sólida de madera (opcional)



### Indicaciones clínicas:

- Paciente con postura simétrica o asimétrica leve que requiere soporte postural moderado
- Soporte a nivel de fémur y trocánteres para estabilidad pélvica lateral y posterior
- Riesgo alto de desarrollo de úlceras por presión
- Usuarios que pueden realizar cambios de peso de manera autónoma
- Peso máximo usuario: 150 kg


#### ***“Integridad de la piel con estabilidad”***



Bolsa de fluido Jay



Base sólida de madera

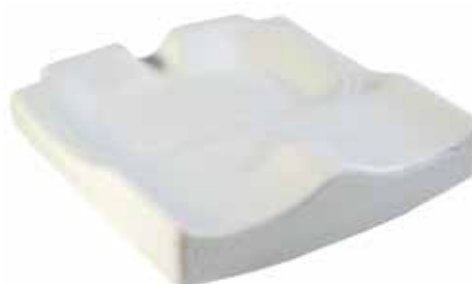


Base de espuma contorneada

### Tallas de cojín JAY® Easy Fluid (42 tallas)

| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| cm    | 25            | 30 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |  |  |
| 25    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 30    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 35    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 40    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 42    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 44    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 46    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 50    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 56    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |
| 60    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |

| Altura (en cm) |         |
|----------------|---------|
| Frontal        | Trasera |
| 6 cm           | 6 cm    |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Peso cojín 40 x 40cm | 1,6 kg |
| Peso máx. usuario    | 150 kg |
| Garantía             | 2 años |

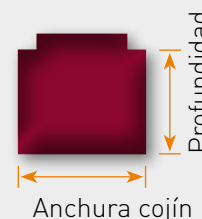

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.



# Xtreme Active

Protección de la piel y estabilidad para el usuario activo

## Características:

- Ligero y de bajo perfil para facilitar la propulsión y las transferencias. Reducción de presión y estabilidad para optimizar la funcionalidad.
- Bolsa de fluido JAY que optimiza la protección de la piel y minimiza la fricción durante la propulsión y las transferencias, protegiendo la zona isquiática.
- 2 diferentes tamaños de la bolsa de fluido, en función de las necesidades clínicas del usuario.
- Funda interior resistente a la incontinencia y 3 opciones para la funda exterior: microclimática, elástica o de incontinencia.
- Kit de posicionamiento opcional para asegurar la alineación de las extremidades inferiores y aumentar el confort del usuario. Compuesto por 3 cuñas que pueden añadirse fácilmente a la funda interior del cojín mediante velcros.



## Tallas de cojín JAY® Xtreme Active

| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| cm    | 34            | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 34    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 36    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |

## Indicaciones clínicas:

- Usuario activo que necesita óptima protección de la piel con estabilidad en un cojín de bajo perfil
- Usuarios con posturas simétricas y capaces de realizar independientemente cambios de peso.
- **Bolsa de Fluido Standard:** Ofrece un nivel de redistribución de la presión de moderado a alto y es la solución para la gran mayoría de usuarios.
- **Bolsa de Fluido Overfill:** Indicada en usuarios con atrofia muscular avanzada y alta fragilidad de la piel, que no desean un cojín pesado ni de alto perfil pero que requieren protección muy alta en las zonas prominentes de la pelvis.

**“Ligero y de bajo perfil; protección modular para un ritmo de vida activo”**




→ **Bolsa de fluido Standard**  
con base de espuma standard.



→ **Bolsa de fluido Overfill**  
Con una mayor cantidad de fluido para favorecer la inmersión de los isquios. Siempre con la base de hondonada pélvica más amplia.

| Altura (en cm) |  |
|----------------|--|
| Frontal        |  |
| 5 cm           |  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Peso cojín 40x40cm fluido standard | 1,7 kg  |
| Peso cojín 40x40cm fluido overfill | 2, 2 kg |
| Peso máx. usuario                  | 150 kg  |
| Garantía                           | 2 años  |

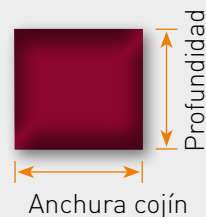

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

## Care

Postura y protección antiescaras en geriatría

### Características:

- Base de soporte estable con forma contorneada para un posicionamiento moderado.
- Bolsa de fluido Jay en toda la superficie del cojín asegurando la protección de la piel en toda el área de contacto: 2-3 cms de inmersión para tuberosidades isquiáticas.
- Estabilidad antero-posterior moderada con contorno leve que evita el deslizamiento hacia delante de la pelvis
- Base de cojín moldeada para lograr estabilidad en asientos de tapicería.
- Impermeable: funda resistente a la incontinencia en todo el cojín
- Bolsa de fluido incorporada en la base: limpieza y reutilización más fácil
- La capacidad de desplazamiento del fluido Jay y la funda amplia y flexible acompañan el movimiento del paciente reduciendo la fricción y protegiendo la zona isquiática.



### Tallas de cojín JAY® Care

| Prof. | Anchura cojín |    |    |
|-------|---------------|----|----|
| cm    | 40            | 45 | 50 |
| 40    |               |    |    |
| 45    |               |    |    |

### Indicaciones clínicas:

- Diseñado para el paciente geriátrico; protección antiescaras y soporte postural moderado.
- Usuario con riesgo moderado de úlceras por presión que requiere soporte postural moderado.
- Indicado en retroversiones pélvicas fijas que acompañan a cifosis estructuradas.
- Uso recomendado en conjunto con el respaldo de posicionamiento Jay Care.
- Usuarios que pueden realizar cambios de peso de manera autónoma.


### “Manejo de la retroversión pélvica geriátrica”



Bolsa de fluido Jay incorporada en la base

| Altura (en cm) |         |
|----------------|---------|
| Frontal        | Trasera |
| 9,6 cm         | 9,6 cm  |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Peso cojín 41 x 43cm | 2,3 kg |
| Peso máx. usuario    | 113 kg |
| Garantía             | 2 años |

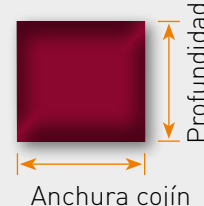

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

# Lite

Extremadamente ligero, función microclimática superior

## Características:

- Base de espuma firme, muy ligera y transpirable
- Tecnología pélvica Optiwell: Diseño anatómico de la hondonada que provee estabilidad lateral y anteroposterior para óptima funcionalidad.
- Relleno de espuma microperforada con funda transpirable de serie. Opción de relleno de espuma de poliuretano con funda de incontinencia.
- Cortes isquiáticos en la base para una óptima inmersión de los isquios, estabilidad y distribución de presión superior
- Funda microclimática 3DX para máxima disipación del calor y la humedad
- Opción Jay Lite Posicionamiento con soporte interno y lateral de fémur.



Jay Lite Standard



Jay Lite Posicionamiento

## Tallas de cojín JAY® Lite

| Prof.<br>cm | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|
|             | 35            | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 35          |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 38          |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 40          |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 42          |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 44          |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 46          |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 50          |               |    |    |    |    |    |    |    |

## Indicaciones clínicas:

- Pacientes activos que requieren confort y soporte postural leve/moderado con cojín de peso muy reducido.
- Pacientes con buena integridad de la piel y riesgo moderado de desarrollo de úlceras por presión.
- Pacientes que pueden realizar cambios de peso de manera autónoma
- Pacientes que requieren máxima disipación del calor y la humedad

***“Muy ligero, con funda microclimática que disipa el calor y la humedad”***




Base de espuma ultraligera y 2 opciones para el relleno de la hondonada

| Altura (en cm) |         |
|----------------|---------|
| Frontal        | Trasera |
| 7 cm           | 7 cm    |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Peso cojín desde  | 0,66 kg |
| Peso máx. usuario | 150 kg  |
| Garantía          | 2 años  |

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

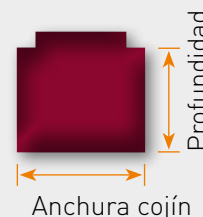

# Jay Balance

Protección de la piel, estabilidad y confort



## Características:

- Base de espuma contorneada de doble capa para soporte y confort.
- Opción de bolsa de Fluido Jay o aire Roho (de 1 o 2 válvulas) para relleno de la hondonada pélvica y favorecer la inmersión en el cojín
- 2 fundas: funda interior impermeable de fácil limpieza, y 3 opciones de funda exterior: elástica, microclimática o resistente a la incontinencia (todas ellas lavables a máquina).
- Cuñas de posicionamiento disponibles.



## Indicaciones clínicas:

- Paciente con riesgo alto de escaras que pueden tener o no necesidades de posicionamiento altas
- Pacientes que requieren óptima estabilidad pélvica
- Indicado en usuarios incapaces de reposicionarse o realizar independientemente los cambios de peso

***“El equilibrio perfecto entre protección de la piel y estabilidad”***




## Tallas de cojín JAY® Balance

| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| cm    | 34            | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |  |
| 34    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 36    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 38    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 40    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 42    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 44    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 46    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 48    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 50    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 56    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 60    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| PLA   | A             |    |    | B  |    |    |    |    |    | C  |    |  |

## Jay Balance Pedido especial

El cojín Jay balance se puede pedir a medida del usuario tanto en anchura como en profundidad para una adaptación óptima. Consulte la hoja de pedido del Jay Balance.

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Altura Máx.           | 8,5 cm                                                 |
| Peso cojín 40 x 40 cm | 2,3 kg (con fluido),<br>1,6 kg (con aire)              |
| Peso máx. usuario     | 150 kg (anchuras 34-50cm)<br>225 kg (anchuras 56-60cm) |
| Garantía              | 2 años                                                 |

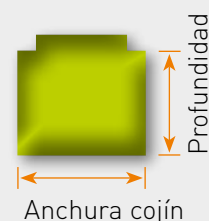

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

# Jay Balance

Protección de la piel, estabilidad y confort

## Descubre el equilibrio con Jay Balance

JAY ha desarrollado el nuevo cojín Jay Balance tras años de experiencia en el mercado ofreciendo la más alta protección de la piel con la máxima estabilidad y confort .




**PROTECCIÓN DE LA PIEL Y CONFORT.** La forma contorneada de la base y su composición de espuma suave permiten la inmersión de las tuberosidades isquiáticas y los trocánteres protegiendo así la piel del usuario y maximizando su confort durante la sedestación. La exclusiva forma trasera de la hondonada evita migraciones del fluido y gracias al sistema de 2 fundas, Jay Balance proporciona al mismo tiempo respiración de la piel y protección anti-humedad del cojín.

**ESTABILIDAD Y POSICIONAMIENTO** gracias a la forma y tamaño de la hondonada pélvica y a las cuñas de posicionamiento que pueden añadirse fácilmente a la funda interior del cojín para adaptarse a las necesidades de posicionamiento específicas de cada usuario.

## Base de espuma contorneada, multi-capa

El cojín Jay Balance tiene una base contorneada, conformada a partir de espuma de celdas cerradas. Su especial diseño en la zona del fémur y en la parte trasera ayuda a prevenir la migración del fluido, al mismo tiempo que proporciona un suave soporte a los trocánteres y a la parte posterior de la pelvis. Los nuevos cortes biselados de la base facilitan el acople a la tapicería reduciendo la altura de asiento.

La anchura de la hondonada pélvica es el resultado de un estudio en el que se han observado las dimensiones medias de la pelvis para cada una de las tallas de cojín. Esto hace que la hondonada del Jay Balance tenga las dimensiones idóneas para ofrecer a la gran mayoría de usuarios estabilidad anterior y lateral, un correcto posicionamiento y con ello asegurar los objetivos clínicos de inmersión de las zonas de riesgo y distribución del peso para una protección máxima de la piel.

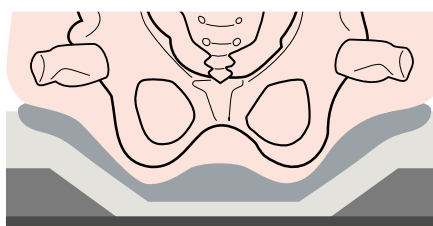



## Relleno de la hondonada pélvica - Tecnología de Fluido JAY™ o aire ROHO™

La hondonada pélvica es la pieza clave del cojín. Es la parte que envuelve las prominencias óseas de la pelvis maximizando el reparto de presiones y manteniendo la buena integridad de la piel.

El cojín Jay Balance ofrece 2 opciones para el relleno de la hondonada: bolsa de fluido JAY o bolsa de aire ROHO. Ambas se ajustan perfectamente a la forma de cada individuo, a su posición sentado, y aseguran la colocación adecuada del fluido/aire por debajo de las prominencias óseas para óptima protección de la piel.



El diseño especial de la bolsa de fluido JAY garantiza resultados óptimos durante todo el ciclo de vida del cojín.



El nivel de aire de la bolsa ROHO puede ajustarse para acomodar posturas asimétricas o cambios del paciente.



## Kit de posicionamiento (opcional)

Las cuñas y soportes contenidos en este kit permiten un correcto posicionamiento de la pelvis y las piernas, ofreciendo solución a múltiples necesidades clínicas. Favorecen la alineación corporal, aumentan la tolerancia a la sedestación y permiten la adaptación a futuros cambios en las necesidades del usuario.

También pueden añadirse opcionalmente las cuñas de oblicuidad garantizando la simetría lateral de la pelvis cuando sea necesario.

# Jay Balance

## Tecnología de doble funda

- Para garantizar la comodidad y protección del usuario, Jay Balance incorpora de serie 2 fundas: una interior y otra exterior. Aunando las ventajas de cada una de ellas es posible conseguir el equilibrio perfecto entre óptima ventilación de la piel y una efectiva protección del cojín frente a la incontinencia del usuario.
- La funda interior es impermeable y muy fácil de retirar y limpiar. Con tecnología Aqua-guard y cosido especial en la cremallera para garantizar que la base de espuma se mantenga siempre seca.
- La funda exterior Microclimática favorece la ventilación y disipa el calor y la humedad para una mayor protección de la piel. Jay Balance permite además seleccionar otros 2 tipos de funda exterior: Funda de Incontinencia o Funda Elástica.
- Todas las fundas exteriores se caracterizan por su excepcional flexibilidad. Esto es importante ya que permite incorporar al cojín las cuñas de posicionamiento sin generar tensiones y ayuda a reducir el riesgo de desarrollar úlceras por presión. Además pueden lavarse a máquina hasta 60° C y son de secado rápido.



**Funda Microclimática**



**Funda de Incontinencia**



**Funda Elástica**



Todas las fundas exteriores pueden ser lavadas a máquina. Instrucciones de lavado: A máquina a 60°; secado al aire o en secadora a temperatura baja

## Jay 3 Standard o Profundo

El sistema de Sedestación modular más completo

### Características:

- Base Jay 3 personalizable con 3 tamaños de hondonada pélvica. Posibilidad de ajustar el tamaño de la hondonada y los niveles de fluido/aire.
- Base Jay3 Standard o Profunda
- Tecnología Optiwell: tamaño y forma anatómica de la hondonada pélvica para óptima estabilidad y distribución de la presión
- Opción de tecnología de Fluido (Std o personalizable) o de Aire Roho (1 ó 2 válvulas). Inmersión de las tuberosidades isquiáticas de hasta 4 cm
- Opción de Funda de Incontinencia o Microclimática para óptima disipación del calor y la humedad.
- Amplia gama de cuñas de posicionamiento disponibles



### Indicaciones clínicas:

- Paciente con riesgo alto (Jay3 Standard) o extremo (Jay3 Profundo) de escaras y necesidad de posicionamiento de moderada a muy alta o bien necesidades que pueden cambiar con el tiempo.
- Postura simétrica o asimétrica y necesidad de estabilidad lateral y antero-posterior
- Indicado en pacientes incapaces de reposicionarse o realizar independientemente los cambios de peso

**“Redistribución de la presión superior, óptima estabilidad postural y posicionamiento de moderado a muy alto”**



Base sólida de madera

### Tallas de cojín JAY® 3


△ Sólo con perfil Standard

| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| cm    | 30            | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |
| 30    | △             | △  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 35    | △             |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 38    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 40    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 42    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 44    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 46    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 48    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 50    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 56    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 60    |               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### Jay 3 Pedido especial

El cojín Jay3 se puede pedir a medida del usuario tanto en anchura como en profundidad para una adaptación óptima. Consulte la hoja de pedido “Jay 3 Modificado”.

|                        |                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------|
| Altura Máx. (standard) | 9,5 cm                                                 |
| Altura Máx. (Profundo) | 10,8 cm                                                |
| Peso máx. usuario      | 150 kg (anchuras 30-50cm)<br>227 kg (anchuras 56-60cm) |
| Garantía               | 2 años                                                 |

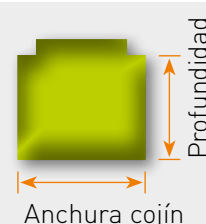

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.



## 1.) Base Jay 3. Dos profundidades—Standard y Profundo

Jay 3 está disponible tanto en perfil Standard como en Profundo. La versión profunda ofrece una inmersión óptima para el usuario con riesgo muy alto de escaras, que puede tener atrofia muscular severa y/o compromiso de integridad de la piel. La versión estándar ofrece redistribución de presión y estabilidad para usuarios con riesgo alto de escaras, pero sin tanto compromiso de masa muscular e integridad de la piel.



**Standard:** Usuario con riesgo alto de escaras.



**Profundo:** Riesgo extremo de escaras, requiere la máxima inmersión debido a una importante atrofia muscular.

## 2.) Base Jay 3. Hondonada Pélvica Optiwell™ PLA (PLA = Pelvic Loading Area)

Diseñada basándose en numerosos estudios antropométricos, la hondonada Optiwell del cojín Jay3 tiene la forma y el tamaño óptimos para redistribuir uniformemente la presión bajo la pelvis proporcionando una efectiva protección antiescaras junto con la máxima estabilidad.

La hondonada pélvica (PLA) está dimensionada para acomodar las medidas antropométricas de la pelvis y es independiente de la anchura del cojín.

Esto asegura una inmersión óptima de los isquios en el fluido/aire y hace que la presión se redistribuya hacia el fémur.

Mínimo riesgo de inestabilidad lateral, oblicuidad pélvica y riesgo potencial de úlceras por presión.

La experiencia indica que el tamaño de la PLA standard del cojín es el apropiado para la gran mayoría de usuarios.

Hay 3 tamaños de PLA disponibles.

A: Standard en tallas de cojín de 30 a 38cm



B: Standard en tallas de cojín de 40 a 48cm

C: Standard en tallas de cojín de 50 a 60cm

Aún así, existe la opción de reducir el tamaño de la PLA mediante un anillo reductor, para los casos en los que sea necesario clínicamente para optimizar la estabilidad lateral.



Base de espuma Jay3 con hondonada pélvica Optiwell

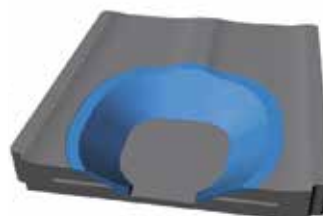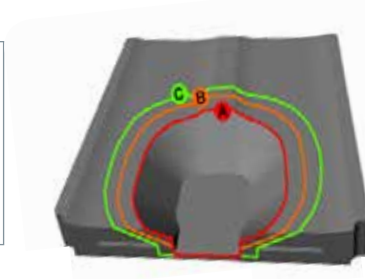

# Jay 3 Standard o Profundo

El sistema de Sedestación modular más completo

## 3) Opción de tecnología de Fluido o Aire

JAY 3 es el sistema de sedestación más completo ya que con la misma base permite elegir entre tecnología de FLUIDO o de AIRE, adaptándose a las necesidades clínicas y/o preferencias de cada usuario.

La bolsa de fluido o aire está diseñada para que se acople siempre perfectamente a la forma y tamaño de la hondonada Jay 3.

**Opción de Fluido Jay:** Ideal cuando la facilidad de uso y el mínimo mantenimiento es una prioridad

### Bolsa de Fluido Standard (FF)

Indicado en posturas simétricas y condiciones clínicas estables

- Volumen de fluido pre-establecido y Standard
- Opción de pedido especial como Overfill, Underfill o relleno asimétrico

### Bolsa de Fluido Personalizable (FV)

Para valoraciones más personalizadas. Permite elegir el nivel de Fluido más adecuado, posicionar asimetrías in situ y acomodar cambios posteriores en la evolución del usuario.

- Cada bolsa de fluido Personalizable viene de serie con un 20% menos de fluido que la bolsa std (Underfill)
- Cada bolsa de fluido personalizable incorpora de serie 2 pads de suplemento de fluido (con estos 2 pads incorporados tenemos el mismo nivel de fluido que en el cojín standard)
- Permite acoplar suplementos de fluido adicionales de diferentes tallas: S, M, L, XL (Overfill). (Cada Bolsa de Fluido Personalizable posee 4 puntos de anclaje situados estratégicamente donde acoplar los suplementos de fluido extra)
- Overfill, Underfill o ajustes asimétricos según necesidades
- Flexibilidad y versatilidad para satisfacer las necesidades clínicas



# Jay 3 Standard o Profundo

## Opción de Aire Roho®:

Opción ideal cuando la ligereza del cojín es prioridad. Optimización de los picos de presión sin sacrificar la estabilidad ni el posicionamiento.

### Bolsa de aire de 1 válvula (AS)

- Ajuste in situ para optimizar el nivel de aire en el usuario estable y simétrico.

### Bolsa de aire de 2 válvulas (AD)

- Ajuste independiente del nivel de aire en cada cámara.
- Indicado especialmente para acomodar/corregir oblicuidades pélvicas y/o cambios en la evolución del usuario.

Las válvulas son fácilmente accesibles en el lateral delantero del cojín.

El volumen de aire puede ser ajustado finamente utilizando las válvulas y la bomba de aire Roho.

La bomba de inflado y el kit de reparación están incluidos de serie con cada cojín.

*Atención! Para asegurar el correcto funcionamiento, el volumen de aire debe ser revisado diariamente*



## 4.) Opción de Funda de Incontinencia o Microclimática

Una funda para cada talla, que acomoda tanto el perfil Standard como el profundo así como las cuñas de Posicionamiento Jay3. Diseño amplio de la funda (Oversized) que reduce la tensión y fuerza de reacción de la superficie permitiendo una inmersión óptima de la pelvis en la bolsa de fluido/aire.

La capa de espuma reticulada incrementa el confort y la tolerancia a la sedestación. Esto es fundamental ya que la incomodidad del usuario conlleva dolor, fatiga, incremento de tono e incluso abandono del equipo de sedestación.

### Funda Microclimática standard (recomendada):

El tejido tridimensional 3DX consigue una disipación óptima del calor y la humedad, proporcionando al usuario una alta protección antiescaras. La capa de espuma reticulada facilita el flujo del aire optimizando la respiración de la piel.

### Funda de Incontinencia:

Indicada en usuarios que padecen incontinencia

Ambas fundas pueden ser lavadas a máquina. Instrucciones de lavado: A máquina a 60°; secado al aire o en secadora a temperatura baja



# Jay 2

Estabilidad y posicionamiento con alta protección antiescaras



## Características:

- Base firme con hondonada pélvica que optimiza la estabilidad lateral y anteroposterior.
- Base de espuma modificable para posicionamientos asimétricos y personalizaciones del cojín.
- Bolsa de fluido Jay para inmersión de las tuberosidades isquiáticas hasta 4 cms.
- **Opción de fluido Recline.** Indicado especialmente en sillas basculantes para evitar la migración de fluido hacia atrás gracias a su diseño especial de sellado y para optimizar la protección.
- La capacidad de desplazamiento del fluido Jay y la funda flexible y amplia reducen la fricción protegiendo la zona isquiática.
- Amplia gama de accesorios para soporte postural.
- Funda Microclimática como estándar, con laterales de neopreno para estética y funcionalidad
- Opción de funda resistente a la incontinencia.
- Opción de base sólida de madera para un soporte firme y evitar el deterioro del cojín.

## Indicaciones clínicas:

- Paciente con postura simétrica o asimétrica que requiere alto soporte postural
- Ideal para pacientes con riesgo alto de úlceras por presión y/o pobre integridad dérmica
- Usuarios con estabilidad limitada, incapaces de reposicionarse o realizar independientemente los cambios de peso.
- Peso máximo de usuario: 150 kg

**“Posicionamiento y estabilidad con alta protección antiescaras”**



Bolsa de fluido Jay

Base con hondonada pélvica




## Tallas de cojín JAY® 2

| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |    |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|
| cm    | 36            | 40 | 43 | 45 | 50 | 60 |
| 40    |               |    |    |    |    |    |
| 43    |               |    |    |    |    |    |
| 45    |               |    |    |    |    |    |
| 50    |               |    |    |    |    |    |

## Jay 2 Pedido especial

El cojín Jay2 se puede pedir a medida del usuario tanto en anchura como en profundidad para una adaptación óptima. Consulte la hoja de pedido “Jay 2 Modificado”.

| Altura (en cm)       |         |
|----------------------|---------|
| Frontal              | Trasera |
| 7,6 cm               | 7,6 cm  |
| Peso cojín 39 x 41cm | 2 kg    |
| Peso máx. usuario    | 150 kg  |
| Garantía             | 2 años  |

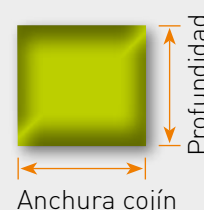

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

# Jay 2 Profundo

Máxima protección antiescaras con alto posicionamiento

## Características:

- Espuma contorneada para estabilidad pélvica y redistribución de la presión hacia la zona femoral y ambos trocánteres. Excelente estabilidad lateral y anterior
- Base firme con hondonada pélvica para posicionamiento moderado-agresivo, modificaciones y personalizaciones de la base.
- Bolsa de fluido Jay profunda que permite una excelente inmersión de las tuberosidades isquiáticas (mayor de 4 cms)
- Amplia gama de accesorios de posicionamiento
- Funda Microclimática como estándar, con laterales de neopreno para estética y funcionalidad
- Opción de funda resistente a la incontinencia.
- Opción de base sólida de madera para sillas con tapicería
- Opción de base ajustable en altura para regulación altura asiento-suelo



## Indicaciones clínicas:

- Paciente con riesgo extremo de úlceras por presión y necesidad alta de soporte postural
- Historia clínica de escara anterior o presente.
- Paciente muy pasivo, incapaz de reposicionarse o realizar cambios de peso independientemente.
- Pacientes sin estabilidad postural
- Peso máximo de usuario: 150 kg

***“Protección máxima antiescaras y alto soporte postural”***



Bolsa de fluido  
Jay 2 Profundo




Base de espuma contorneada  
de 7,6 cm de profundidad

## Tallas de cojín JAY® 2 Profundo

| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|
| cm    | 36            | 38 | 41 | 44 | 46 | 51 | 56 | 61 |
| 36    |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 38    |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 41    |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 44    |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 46    |               |    |    |    |    |    |    |    |
| 51    |               |    |    |    |    |    |    |    |

| Altura (en cm) |         |
|----------------|---------|
| Frontal        | Trasera |
| 10 cm          | 10 cm   |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Peso cojín 41 x 41cm | 2,4 kg |
| Peso máx. usuario    | 150 kg |
| Garantía             | 2 años |

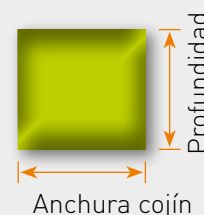

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

# Jay GS

Estabilidad, posicionamiento y crecimiento del usuario pediátrico



## Características:

- Base firme con hondonada pélvica para óptima estabilidad lateral y anteroposterior
- Base de espuma modificable y **adaptable al crecimiento en anchura y profundidad**
- Caja con múltiples accesorios posturales de fácil aplicación para óptimo posicionamiento
- Bolsa de fluido Jay Standard en 3D y opción de fluido "overfill" (más fluido) para protección extra antiescaras: inmersión de tuberosidades isquiáticas de hasta 4 cm
- Opción de plataforma sólida ajustable
- Opción de base sólida de madera
- Funda resistente a la incontinencia de serie, (funda upsized o funda microclimática opcional)



Jay GS con Funda de Incontinencia

## Tallas de cojín JAY® GS

| Prof.<br>cm | Anchura cojín |    |    |    |    |
|-------------|---------------|----|----|----|----|
|             | 25            | 30 | 36 | 40 | 45 |
| 33          |               |    |    |    |    |
| 38          |               |    |    |    |    |
| 43          |               |    |    |    |    |
| 48          |               |    |    |    |    |
| 50          |               |    |    |    |    |

## Indicaciones clínicas:

- Paciente pediátrico con postura asimétrica y alta exigencia de soporte postural
- Riesgo alto de úlceras por presión
- Indicado en pacientes incapaces de reposicionarse o realizar cambios de peso de manera autónoma.
- Capacidad de adaptación al crecimiento del niño tanto en anchura como en profundidad

**"Posicionamiento completo durante el crecimiento, con opción de bolsa de fluido overfill para máxima protección antiescaras"**



Nuevo diseño 3D  
Bolsa de fluido Standard



Fluido Overfill opcional



Amplia gama de cuñas y accesorios posturales



Base sólida ajustable


## Jay Gs Pedido especial

El cojín Jay GS se puede pedir a medida del usuario tanto en anchura como en profundidad para una adaptación óptima. Consulte la hoja de pedido "Jay GS Modificado"

### Altura (en cm)

| Frontal | Trasera |
|---------|---------|
| 6,5 cm  | 6,5 cm  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Peso cojín 25 x 33cm. | 0,6 kg |
| Peso máx. usuario     | 150 kg |
| Garantía              | 2 años |

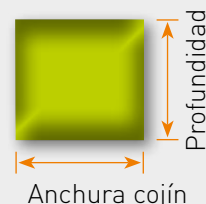

# Jay Fit

Soporte extra y Abducción de caderas

## Características:

- Base de aluminio ajustable en altura, profundidad y ángulo.
- Base firme con hondonada pélvica para óptima estabilidad lateral y anteroposterior.
- Capas de espuma de diferente densidad para relleno hondonada pélvica: confort y protección antiescaras.
- Opción de bolsa de fluido Jay para inmersión de tuberosidades y máxima protección antiescaras.
- Reductores laterales y de profundidad de serie para adaptación al crecimiento en anchura y profundidad.
- Opción de cuñas adductoras, soportes pélvicos laterales y taco abductor para posicionamiento extra.
- Funda externa transpirable y funda interna resistente a la incontinencia.
- Opción de colores en funda resistente a la incontinencia



Jay Fit con accesorios

## Tallas de cojín JAY® Fit

| Prof. | Anchura cojín |    |    |    |    |
|-------|---------------|----|----|----|----|
| cm    | 25            | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 30    |               |    |    |    |    |
| 35    |               |    |    |    |    |
| 40    |               |    |    |    |    |
| 45    |               |    |    |    |    |
| 50    |               |    |    |    |    |

Para ver el sistema de sedestación Jay Fit completo, consulte la página respaldo Jay Fit (pág 37).

## Indicaciones clínicas:

- Diseñado para adaptarse al crecimiento del niño
- Indicado especialmente en pacientes que necesiten abducción de caderas y soporte extra.
- Su modularidad y ajustabilidad favorece la estabilidad del usuario y el confort, reduciendo el tono patológico

***“Posicionamiento óptimo en pacientes con necesidad de soporte extra y durante el crecimiento del niño”***



Reductores laterales de serie




Reductores de profundidad de serie



Cuñas de posicionamiento atornilladas a la bse



Opción de fluido

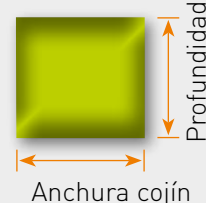

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso máx. usuario | 113 kg |
| Garantía          | 2 años |

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

## Jay 2 Plus

Protección antiescaras y posicionamiento para el usuario bariátrico

### Características:

- Base de cojín contorneada para estabilidad pélvica. Soporte de zona femoral y trocánteres que provee estabilidad pélvica lateral y posterior.
- Bolsa de fluido Jay que redistribuye la presión ofreciendo protección antiescaras: inmersión de hasta 4 cm de las tuberosidades isquiáticas.
- La inmersión en la bolsa de fluido Jay y el soporte de la base contorneada aumenta la superficie de contacto aumentando la tolerancia a la sedestación
- Opción de capas de espuma de diferente densidad (en lugar del fluido) para usuarios con menor riesgo de escaras.
- Base firme y modificable para personalizaciones del cojín y accesorios para posturas asimétricas.
- Funda resistente a la incontinencia como standard, flexible y amplia para proteger la zona isquiática.
- Opción de funda transpirable

### Indicaciones clínicas:

- Pacientes bariátricos de hasta 295 kg con riesgo moderado-alto de úlceras por presión.
- Paciente con postura simétrica ó asimétrica y necesidad de soporte postural moderado.

### ***“Protección y posicionamiento para usuarios bariátricos”***



Funda resistente a la incontinencia



Base sólida de madera de manzano (opcional)



Bolsa de fluido Jay



Base de cojín precontorneada




### Tallas de cojín JAY® 2 Plus

| Prof.<br>cm | Anchura cojín |    |    |    |
|-------------|---------------|----|----|----|
|             | 50            | 55 | 61 | 66 |
| 45          |               |    |    |    |
| 50          |               |    |    |    |
| 55          |               |    |    |    |

| Altura (en cm) |         |
|----------------|---------|
| Frontal        | Trasera |
| 8 cm           | 8 cm    |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso máx. usuario | 295 kg |
| Garantía          | 2 años |

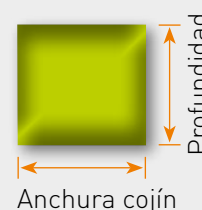

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

# Cuñas de posicionamiento cojín Jay3, Jay 2 y Jay Gs


Los cojines Jay 3, Jay 2 y Jay Gs ofrecen una excelente capacidad de posicionamiento gracias a su base modificable, estable (de células cerradas) y a la opción de poder añadir una amplia gama de cuñas de posicionamiento para crear contornos de mayor soporte.

Existen los siguientes **KIT DEMO** disponibles para su uso en valoraciones:

## Cuñas de posicionamiento cojín Jay 3



- Cuñas adductoras
- Cuñas abductoras
- Soportes pélvicos
- Cuña de oblicuidad pélvica
- Base sólida de madera

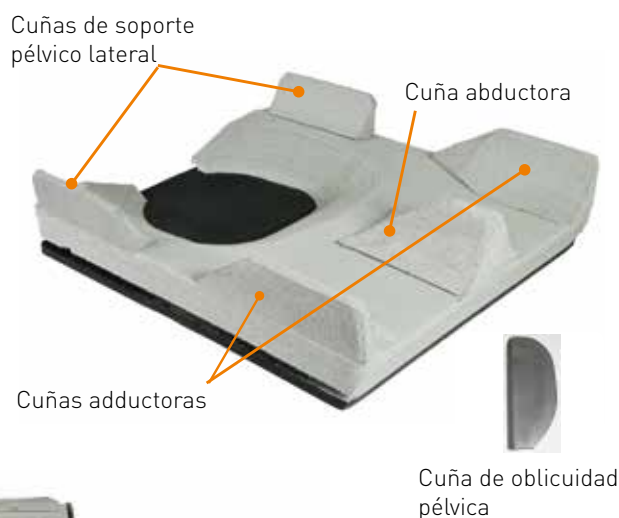

## Cuñas de posicionamiento cojines Jay2 y Jay GS



# Accesorios de posicionamiento



## Base sólida ajustable

Recomendada en posicionamientos donde es necesario ajustar la altura del asiento y/o el ángulo asiento/respaldo.



## Base sólida de madera

Recomendada para asientos de tapicería. Garantiza una superficie plana y firme de soporte. Esto nos garantiza un buen posicionamiento y evita el deterioro del cojín.



## Taco abductor Jay Fit

Cuña abductora, ajustable en ángulo, altura, anchura y longitud. Fácilmente abatible



## Soportes JAY para pies



## Peto Contour JAY



## Arnés diseño en Y JAY



## Reductores laterales para adaptar el cojín Jay GS al crecimiento en anchura



## Caliper

Medidor de tronco y pelvis para valoraciones y toma de medidas



## Cuña de ajuste en ángulo



## Cinturón 4 puntos diseño en V JAY

Colores disponibles para las fundas de incontinencia de los cojines Jay Fit.



# Beneficios de los Respaldos rígidos

Prevención, confort, calidad de vida

Los respaldos rígidos proporcionan a los usuarios los siguientes beneficios:

## Beneficios clínicos

- Soporte postural firme para óptimo alineamiento y posicionamiento en sedestación
- Mejora la estabilidad necesaria para una óptima funcionalidad
- Mejora la función respiratoria, la deglución y el campo visual del usuario
- Previene deformidades musculoesqueléticas y sus correspondientes cirugías
- Regularización del tono en pacientes espásticos y/o hipertónicos
- En pacientes pediátricos promueve el desarrollo motor, cognitivo y el aprendizaje
- Mejora la distribución de la presión preservando la integridad de la piel (función antiescaras)

## Beneficios en la calidad de vida:

- Confort: el respaldo ofrece soporte al usuario manteniéndolo estable y funcional, y aumentando así la tolerancia del usuario a la sedestación prolongada
- Máximo potencial funcional
- Potencia la autoestima: El usuario puede sentarse erguido, lo cual le confiere mayor seguridad y confianza en sí mismo
- Facilita y promueve la interacción social
- Diseño elegante



## Respaldos Jay 3

**La gama de respaldos Jay® 3 presenta una amplia variedad de formas y niveles de soporte (desde torácico inferior hasta nivel hombros) adaptándose perfectamente a las necesidades clínicas y altura de cada paciente.**

Seleccionando el contorno, nivel de soporte, anchura y altura de la carcasa, proporciona un soporte óptimo y posicionamiento a la mayoría de los usuarios

Ofrece un único respaldo para cubrir diferentes necesidades.

- Diseñado para dar soporte pélvico posterior firme a usuarios de sillas de ruedas con diferentes grados de discapacidad.
- Gracias a su sistema de anclajes con sólo 2 puntos de fijación, resulta muy fácil de instalar y ajustar por el profesional, así como sencillo de retirar y acoplar para el usuario.
- Además, ofrece múltiples ajustes en anchura, ángulo y profundidad asegurando un rápido y óptimo posicionamiento y alineación de columna
- Y con un diseño ligero (ideal tanto para sillas activas como electrónicas).





# Respaldos Jay 3

## 1. Contorno (soporte lateral)

El respaldo Jay® 3 ofrece **5 tipos de profundidad de contorno**: el **Standard** (SC, Shallow Contour) con 5 cm de profundidad, el **Medio** (MC, Mid Contour) con 8 cm de profundidad, y el **Profundo Costal** (DC, Deep Contour), **Profundo Lumbar** (MDC, Mid Deep Contour) o **Profundo Pélvico** (PDC, Posterior Deep Contour) que proporcionan al paciente 15 cm de soporte en profundidad.

Opción de añadir soportes laterales fijos o abatibles en los Contornos Standard, Medio, Profundo Lumbar y Profundo Pélvico.

### Contorno Standard (SC)



Torácico Inferior/ Torácico Medio  
Torácico Superior /Altura de Hombros

### Contorno Medio (MC)



Torácico Medio/Torácico Superior /  
Altura de Hombros

### Contorno Profundo Costal (DC)



Torácico Superior  
Altura de Hombros

### Contorno Profundo Lumbar (MDC)



Torácico Medio/Torácico Superior /  
Altura de Hombros

### Contorno Profundo Pélvico (PDC)



Torácico Inferior/ Torácico Medio  
Torácico Superior /Altura de Hombros



## 2. Nivel de soporte

Los usuarios pueden elegir entre **4 niveles distintos de soporte**, según sus necesidades funcionales y su estabilidad de tronco.

### Altura de Hombros (SH)

53-61 cm



### Torácico Superior (UT)

42-50 cm



### Torácico Medio (MT)

30-38 cm



### Torácico Inferior (LT)

17-24 cm



## 3. Altura de respaldo

Debido a la variación en altura de los usuarios, cada uno de los 4 niveles de soporte de respaldos Jay® 3, ofrece 3 diferentes alturas : **Bajo** (S-Small), **Medio** (M-Medium) y **Alto** (T-Tall)




Altura respaldo  
Bajo (S)



Altura respaldo  
Medio (M)




Altura respaldo  
Alto (T)

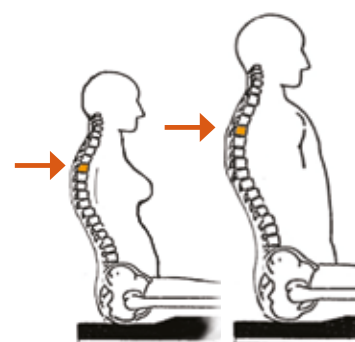

## 4. Anchura de respaldo

La gama de respaldos Jay® 3 ofrece también una variedad de anchuras, que seleccionaremos de acuerdo a la anchura de tronco del usuario y ancho de la silla, garantizando así el ajuste óptimo del respaldo al usuario y a la silla. Las múltiples posibilidades del respaldo Jay® 3 ofrece tanto a terapeutas como a usuarios la posibilidad de seleccionar hasta 145 respaldos diferentes!!

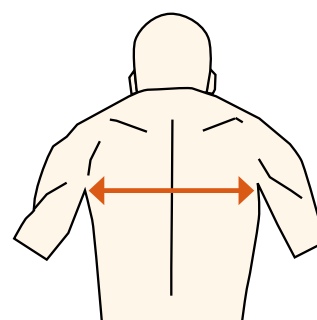

# Respaldos Jay 3

Los diferentes contornos y alturas de respaldo están disponibles en las siguientes combinaciones:



Contorno Standard (SC)



Contorno Medio (MC)



Contorno Profundo Costal (DC)

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



Contorno Profundo Lumbar (MDC)





Contorno Profundo Pélvico (PDC)

Torácico Inferior (LT)

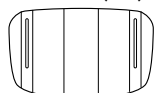


Torácico Medio (MT)

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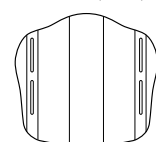


Disponibles con soportes laterales, reposacabezas y arneses.

Torácico Superior (UT)

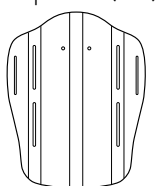

Disponibles con soportes laterales, reposacabezas y arneses.

Altura de Hombros (SH)

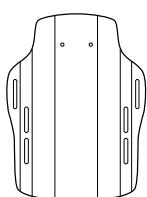

Anchuras disponibles

31, 36, 41, 46 y 51 cm


31, 36, 41, 46 y 51 cm

36, 41, 46 y 51 cm

36, 41, 46 y 51 cm

36, 41, 46 y 51 cm

Para más detalle sobre alturas y tallas disponibles, por favor consulte la hoja de pedido.

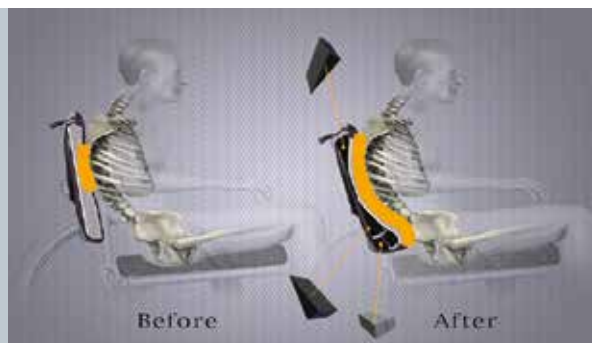

## Posicionamiento y alineación vertebral

Un respaldo rígido debe adaptarse a la forma del usuario con el fin de obtener una distribución óptima de la presión, un soporte correcto y aumentar el confort y la funcionalidad. Por esta razón, el respaldo Jay® 3 ofrece cuñas de posicionamiento que permiten a los profesionales la adaptación total del respaldo al usuario.

### Cuñas de posicionamiento para alineación vertebral

- Proporcionan máxima distribución de la presión para preservar la estabilidad e integridad de la piel
- Proporcionan soporte óptimo y confort, y en consecuencia una mayor tolerancia a la sedestación
- Infinidad de ajustes de adaptación al usuario



### Kits DEMO

Todos los respaldos Jay® 3 incluyen de serie una cuña lumbar para proporcionar el soporte óptimo de la columna lumbo-sacra. Aparte se puede solicitar un Kit DEMO de valoración que el profesional debería utilizar como herramienta de trabajo en todas sus valoraciones, y otros dos mini kits para ajustes posteriores.



**Kit DEMO** para la realización de valoraciones de usuarios, con más de 32 cuñas de posicionamiento.

### Mini Kits para ajustes tras la valoración del usuario



Mini Kit I de posicionamiento vertebral: 7 cuñas

Mini Kit II de posicionamiento vertebral: 12 cuñas

# Respaldos Jay 3



## Sistema de anclajes Jay®

### 1. Compatible con una gran variedad de diámetros de tubos

El sistema de anclajes Jay® 3 presenta un revolucionario diseño de abrazadera que se adapta a tubos desde 1,9 cm hasta 2,8 cm de diámetro.

Con sólo una abrazadera de sujeción, (compatible con el 90% de sillas de ruedas del mercado), y sin necesidad de adquirir piezas de fijación adicionales, se agiliza y simplifica el proceso de pedido e instalación.



2,8 cm



2,5 cm



1,9 cm

### 2. Se puede colocar en múltiples posiciones del tubo del respaldo


Normalmente existen obstáculos, como barras rigidizadoras o reposabrazos que condicionan la instalación del respaldo. Para maximizar la compatibilidad, los dos únicos puntos de anclaje del respaldo Jay® 3, ocupan el mínimo espacio posible permitiendo su instalación sin renunciar al correcto posicionamiento del usuario.



Además, y a diferencia de otros respaldos rígidos, el respaldo Jay® 3 puede ser reajustado en altura después de haber instalado los anclajes y sin modificar su posición, simplemente desplazándolo a lo largo de las ranuras verticales de la carcasa.

### 3. Ajustables en anchura hasta 5 cm


A menudo nos encontramos con usuarios anchos de cadera y estrechos a nivel de hombros, que requieren una silla ancha pero con un respaldo más estrecho. Los anclajes del respaldo Jay® 3 permiten realizar ajustes en anchura hasta 5 cm, pudiendo así colocar por ejemplo un respaldo de 41 cm de anchura en una silla de 46 cm.

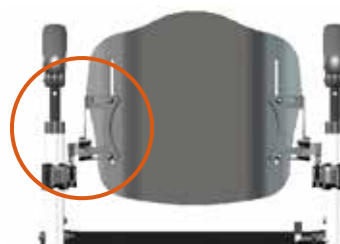

Respaldo de 41cm ancho instalado en silla de 46 cm ancho

#### 4. Ajustable en ángulo hasta 22° (reclinación), sin reducir la profundidad del asiento.

El sistema de anclajes Jay® 3 está diseñado para minimizar la pérdida de profundidad del asiento. Cuando el respaldo Jay® 3 se reclina, la parte inferior permanece en su posición, evitando la pérdida de profundidad de asiento. Esto es una ventaja fundamental para usuarios con deformidades posturales, los cuales pueden necesitar ángulos más pronunciados.

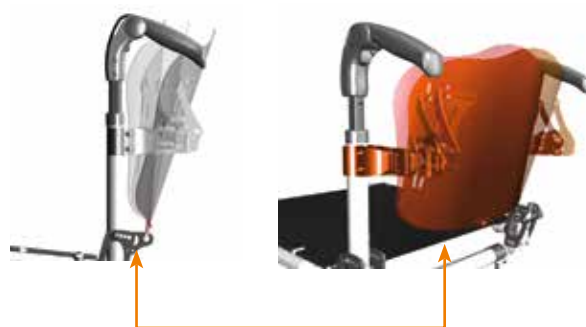

La profundidad del asiento permanece constante. Tanto el ajuste en profundidad como en ángulo de los anclajes son totalmente independientes el uno del otro.

**El sistema de anclajes Jay® 3 es fácil de instalar y retirar y ofrece infinidad de ajustes.**

##### ■ Fácil de Instalar y colocar

Gracias a sus dos únicos puntos de sujeción y a su sencillo sistema de anclajes, el respaldo Jay® 3 es increíblemente fácil y rápido de instalar!! Simplemente deslízcelo en los anclajes y el respaldo se fijará automáticamente.



##### ■ Fácil de Ajustar

Los ajustes finales como la altura, la profundidad y el ángulo del respaldo, pueden llevarse a cabo con el usuario sentado en la silla a fin de obtener la mayor comodidad. Todos estos ajustes pueden realizarse utilizando únicamente las 2 herramientas incluidas con cada respaldo (una llave allen y una llave de estrella-plana)



Ajuste en altura y anchura    Ajuste en profundidad

##### ■ Fácil de Retirar

Desmontar el respaldo Jay® 3 es tarea fácil y rápida. Incluso aquellos usuarios con una mayor discapacidad en las extremidades superiores lo encontrarán muy fácil de desmontar.



# Respaldos Jay 3



## Opciones y Accesorios

El respaldo Jay® 3 ofrece una amplia variedad de accesorios para garantizar el correcto posicionamiento del usuario. Consulte la hoja de pedido para más detalles sobre los accesorios disponibles.

### Anclajes

- Los niveles de respaldo Torácico Inferior (LT) y Torácico Medio (MT) incorporan de serie los **Anclajes Compactos**.
- Los niveles Torácico Superior (UT) y Altura de Hombros (SH) incorporan de serie los **Anclajes Reforzados**. Amplia base de sustentación para mayor estabilidad y resistencia, ideales en usuarios altos y/o con disfunciones neurológicas severas.
- Las anchuras de 46 y 51 cm (nivel Torácico Medio) y la anchura de 51 cm (Torácico Inferior) ofrecen la opción de seleccionar anclajes compactos o anclajes reforzados.



Anclajes Compactos (3 cm de ajuste)  
Usuarios de hasta 136 kg



Anclajes reforzados (5 cm de ajuste)  
Usuarios de hasta 255 kg

### Reposacabezas

El respaldo Jay® 3 permite la adaptación de reposacabezas. Su instalación es fácil y rápida, ya que el respaldo contiene orificios ya perforados listos para la instalación del reposacabezas. Existe una amplia gama de reposacabezas disponibles en la gama Whitmyer (ver catálogo Whitmyer), desde el soporte más básico hasta aquellos indicados en los posicionamientos más complejos. El reposacabezas Jay® 3 incluye el brazo de montaje Axys y la almohadilla Jay Std (ver foto adjunta)



Reposacabezas Jay3  
(J3Cab)



Reposacabezas Gama  
Whitmyer

También está disponible el plato universal para el montaje de reposacabezas distintos a los de la gama Jay/Whitmyer.

## Soportes Laterales

El respaldo Jay® 3 dispone de dos tipos diferentes de soportes laterales: fijos y abatibles. Una de las ventajas que ofrece este respaldo es que permite instalar un lateral fijo de un lado y otro abatible del otro lado, facilitando las transferencias. Ambos tipos de laterales están disponibles en 6 tamaños. (Consultar la hoja de pedido del respaldo Jay® 3 para más información).



Soporte lateral abatible - Ajustable en altura y ángulo



Soporte lateral fijo

## Cinchas y Accesorios de Posicionamiento

La gama completa de cinchas y accesorios de posicionamiento JAY ofrecen una solución integral y completa al paciente en sedestación, tanto niños como adultos y a todos los niveles de soporte (cinturones pélvicos, soportes de tronco, extremidades superiores e inferiores, entre otros).



## Extensión de la funda Jay3

Opción de extensión de la funda para cubrir el espacio abierto que queda entre el respaldo y la parte superior del cojín.



## Test para el transporte en vehículos

Toda la línea de productos y accesorios Jay® 3, incluyendo los reposacabezas, soportes y sus almohadillas, han superado con éxito todos los test de transporte en vehículos, de conformidad con las normas ISO 16840-4 Anexo A y ANSI/RESNA WC/Volumen 4 Sección 20 Anexo A.



Montaje de fijación reposacabezas Jay



Plato universal para otros reposacabezas





# Respaldo Jay 3 Carbono

Siente la diferencia

## Increíblemente ligero...

El carbono es un material ligero y resistente – Y eso lo convierte en el material ideal para este respaldo! Ofreciendo la misma resistencia que el aluminio, pero un 60% más ligero, el respaldo Jay3 Carbono ofrece todas las ventajas de un respaldo rígido pero con el mínimo peso. Atrévete a probarlo...sentirás la diferencia!

## Con mucho estilo

El nuevo respaldo Jay3 Carbono te impresionará por su look moderno e innovador. Un diseño increíble y elegante que atraerá todas las miradas.

## El soporte que necesitas para tu vida activa

El respaldo Jay3 Carbono te proporciona importantes beneficios clínicos y funcionales. El correcto soporte de la pelvis estabiliza la parte superior del tronco, favoreciendo la alineación de la columna y la función de extremidades superiores. Esto además mejora la estabilidad que necesitas para tu vida activa, y reduce el dolor de espalda a la vez que te proporciona una gran comodidad.

Un respaldo rígido garantiza, además, una propulsión más eficaz. La energía se transmite más eficazmente a través del respaldo hacia el armazón, lo que significa que necesitas un menor esfuerzo para propulsar la silla.

## ¡¡Tienes que probarlo!!



# Jay 3 Carbono



## Compatible con todas las sillas

Tanto si usas una silla de chasis rígido como plegable, el nuevo Jay3 Carbono es tu respaldo. Disponible con anclajes fijos o con desmontaje rápido para adaptarse a todas las sillas.



### Muy fácil de retirar

Con la opción de anclajes de desmontaje rápido el respaldo puede retirarse rápida y cómodamente- ideal para sillas que se pliegan!

## 2 tipos de anclajes disponibles, para sillas rígidas o plegables

El respaldo Jay3 Carbono permite seleccionar 2 tipos de anclajes diferentes. Los anclajes fijos son la solución ideal para sillas de chasis rígido, por ser la solución más ligera. Los anclajes de desmontaje rápido en cambio, permiten retirar el respaldo más fácilmente; por eso son ideales para sillas plegables. Con dos únicos puntos de anclaje, ambos sistemas son muy fáciles de colocar y permiten ajustes en el ángulo, profundidad y la anchura del respaldo, para que puedas adaptarlo a tus necesidades y preferencias.

**Anclajes con desmontaje rápido**  
ideales para sillas plegables



**Anclajes fijos**  
La solución más ligera.



## ¿Dónde guardo mi móvil?

Ahora lo tendrás muy fácil porque podrás guardar tus objetos personales en la práctica bolsa para accesorios que te ofrecemos. Esta bolsa ayuda además a cubrir el espacio libre que queda entre el respaldo y el cojín, por si prefieres una imagen más unificada. Te preguntarás que hiciste hasta ahora sin ella!!

**Práctica bolsa para guardar objetos**



# Jay 3 Carbono

## Encuentra tu respaldo!

Porque no todas las necesidades son iguales...el respaldo Jay3 Carbono está disponible en 4 alturas diferentes (desde 17 a 38 cm), especialmente diseñadas para usuarios activos con necesidad de soporte posterior de leve a moderado.

El contorno de 5 cm de profundidad ofrece además soporte lateral leve para una mayor estabilidad.



### Contorno standard

Con 5 cm de profundidad para un soporte lateral leve del tronco.



**Diferentes niveles de soporte,** que garantizan el soporte correcto para cada necesidad. (4 alturas desde 17 a 38 cm)

## Composición de espuma suave y funda microclimática para una máxima protección de la piel

Funda microclimática 3DX™ de serie que disipa el calor y la humedad y favorece la ventilación para una mayor protección de la piel. Lavable a máquina hasta 60°C y de fácil secado, la funda abraza la carcasa para una protección extra. Además permite acoplar cuñas para optimizar el soporte lumbar.

### Funda microclimática

Con tecnología 3DX™: comodidad y función microclimática superior.



## Jay 3 Termorregulador



### Rediseñando la tecnología en respaldos. La revolución en confort

El primer respaldo para sillas de ruedas diseñado para ayudar a mantener tu propio 'microclima'. La tecnología termorreguladora integrada permitirá calentar o ventilar tu respaldo, para un confort excepcional.

El sistema de ventilación provoca el efecto de evaporación disipando la humedad de tu piel para mantenerla siempre fresca y seca. El módulo de calor, por su parte, genera calor de manera continua y progresiva, optimizando el confort en sedestación, especialmente en los días de invierno.

### El primer respaldo con tecnología termorreguladora integrada

La regulación de la temperatura corporal es fundamental para el bienestar y la protección de la piel. Algunas lesiones y/o patologías (lesión medular, esclerosis múltiple, daño cerebral etc.) conllevan la alteración del sistema nervioso autónomo, afectando al control automático de la temperatura corporal, siendo el paciente incapaz de adaptarse a las diferentes condiciones ambientales.

La tecnología termorreguladora patentada del respaldo Jay 3 es especialmente útil en estos usuarios para un confort excepcional. La innovadora tecnología de este respaldo también resulta indicada para usuarios que quieran maximizar su confort y optimizar su tolerancia a la sedestación durante todo el tiempo que pasan sentados en la silla de ruedas, especialmente en condiciones ambientales extremas de calor y/o frío.

Durante años, estudios clínicos se han centrado en el control de la temperatura corporal demostrando los beneficios de los sistemas de ventilación en diversos aspectos.



# Jay 3 Termorregulador

## Funda con tecnología 3DXTM para maximizar el flujo del aire

Maximiza el flujo del aire gracias a sus características microclimáticas y conductos de ventilación de diseño único. La tapicería microclimática 3DX™ facilita el flujo del aire por detrás y hacia el exterior, a través de las ranuras ventilatorias de la carcasa del respaldo. Su material permite un secado rápido que ayuda a reducir el calor y la acumulación de la humedad, manteniendo la piel seca y fresca.

## Sistema de Ventilación con Microventiladores


Incluye dos micro ventiladores incorporados en la espuma. Cuando activamos la función de ventilación, el aire comienza a circular desde los ventiladores situados en la parte trasera de la espuma hacia el exterior del respaldo a través del módulo de ventilación. Se produce un efecto de evaporación que disipa el calor y la humedad de la piel del usuario manteniéndola siempre fresca.

## Tecnología Termorreguladora patentada

El módulo de calor del respaldo Jay 3 Termorregulador ha sido específicamente diseñado para su uso en sillas de ruedas y utiliza espirales que generan calor continuo. Equipado con un sistema automático de apagado que evita que la temperatura supere los 40°.



*Dos microventiladores incorporados*

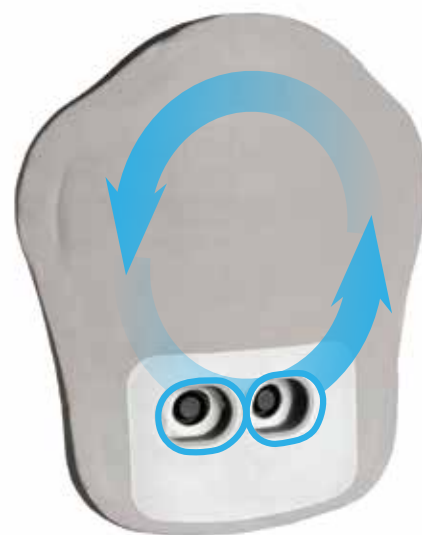

*Interruptor on/off*



# Respaldos Jay Easy



**SIMPLICIDAD:** Para configurar el respaldo sólo es preciso seleccionar contorno y nivel de soporte.

**EFFECTIVIDAD:** El especial diseño de los anclajes hace que estos puedan ser instalados en prácticamente cualquier tubo de respaldo. Además ofrecen ajuste en anchura, profundidad y altura.

**CONFORT:** El diseño de la carcasa en combinación con la funda microclimática y la espuma de alta calidad proporcionan al paciente un soporte eficiente, gran comodidad y por consiguiente un notable aumento en la tolerancia a la sedestación.

## Versátil y muy fácil de retirar. En un sólo paso!

- El respaldo puede retirarse utilizando únicamente una mano. Tirando de la cuerda hacia abajo se libera el mecanismo de bloqueo. Después solo hay que inclinar el respaldo y deslizarlo hacia arriba para extraerlo de los anclajes.
- Los anclajes son compatibles con la gran mayoría de tubos de respaldo: con diámetros desde 1,9 cm a 2,5 cm (para tubos con diámetros de 1,9 y 2,2-2,3 cm es necesario añadir los tubos de relleno que vienen de serie con el respaldo).
- Ajustable en altura, anchura, profundidad y ángulo (de +12° a -12°) con una única herramienta.



Tubos de relleno para diámetros inferiores.

## Tecnología innovadora en la funda

Jay Easy proporciona al paciente un gran confort y protección, aumentando su tolerancia a la sedestación gracias a la funda microclimática y a su interior de espuma suave.

- Material Microclimático 3DX™ que favorece la respiración de la piel ayudando a protegerla del calor y la humedad.
- Lavable a máquina hasta 60° C y de secado rápido.
- Permite acoplar mediante velcros diferentes cuñas de soporte lumbar para ofrecer al paciente un soporte a medida.



# Respaldos Jay Easy


## 2 contornos de respaldo: Standard (SC) o Profundo Pélvico (PDC)

El respaldo Jay Easy ayuda a mantener una postura erguida, estable y ergonómica durante la sedestación. Permite seleccionar 2 contornos diferentes en función del soporte y la estabilidad de tronco que precise el paciente.



**Contorno Standard (SC)**

Soporte lateral de leve a moderado

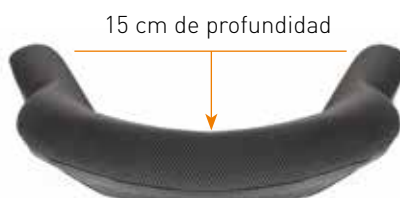

**Contorno Profundo Pélvico (PDC)**

Soporte lateral completo

## 3 niveles de soporte disponibles

Cada paciente necesita soporte a un nivel distinto. Por eso Jay Easy ofrece la posibilidad de seleccionar 3 distintos niveles de soporte: Torácico Medio, Torácico Superior o Altura de Hombros. Estos 3 niveles cubren las necesidades de soporte posterior entre moderadas y altas.



**Torácico Medio**  
Altura 38 cm



**Torácico Superior**  
Altura 46 cm



**Altura de Hombros**  
Altura 53 cm

## Personalizable

Para adaptarse a las necesidades de cada paciente y ofrecerle un soporte óptimo, Jay Easy permite acoplar los siguientes accesorios:

- Reposacabezas
- Soportes laterales
- Arnés y cinturones torácicos
- Cuñas de soporte lumbar

## Tallas disponibles

Anchuras de 36, 41, 46 y 51 cm

# Jay Fit

## Respaldo Jay Fit - Máxima estabilidad para óptima funcionalidad

El nuevo respaldo JAY Fit es fácilmente personalizable para dar solución a los posicionamientos más complejos. Su modularidad y ajustabilidad permite también adaptarse al crecimiento del niño y adolescente manteniendo la simetría pélvica y del raquis.

### El nuevo Jay Fit incorpora:

- Nuevos anclajes ADJUSTABLE QUICK MOUNT
- Innovadora funda microclimática 3DX™
- Espuma contorneada de mayor grosor para extra confort
- Cuñas de posicionamiento Jay para la alineación vertebral
- Compatible con la nueva gama de cinchas y accesorios de posicionamiento JAY
- Compatible con la gama completa de reposacabezas WHITMYER
- Testado para el transporte en vehículos

### Sistema de anclaje - adjustable quick mount

- El sistema de anclaje es fácil de operar y ajustar a cada usuario, para una adaptación óptima individualizada.
- Los anclajes de la carcasa vienen pre-montados para facilitar y reducir el tiempo de montaje
- Nuevo sistema de enganche "Snaptite" para acople rápido y sencillo en la parte superior del respaldo
- Se incluyen varios receptores para acople del respaldo en diferentes diámetros de tubo
- Certificado para el transporte en vehículo



Anclajes inferiores



Anclajes superiores Snaptite



# Jay Fit

## Innovadora tecnología en la funda

- El respaldo JAY Fit lleva de serie Funda Microclimática y espuma de soporte contorneada y suave para máximo confort y protección del usuario.
- El tejido microclimático 3DX™ disipa el calor y la humedad y favorece el flujo del aire, manteniendo la piel seca y fresca
- Lavado a máquina 60° C y secado rápido
- Resistencia probada durante años de uso en la gama de respaldos JAY3



## Modularidad y adaptación para máxima personalización

El respaldo JAY Fit ofrece una amplia gama de accesorios y opciones para configurar el respaldo más adecuado para cada usuario.

- Soportes laterales Fijos y Abatibles con almohadilla plana o curva
- Kit soporte Pélvico postero-lateral para postura erguida
- Cuñas de Posicionamiento JAY para alineación columna vertebral
- Cinchas y accesorios de Posicionamiento JAY
- Reposacabezas Whitmyer



### CINCHAS Y ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO JAY

La amplia gama de cinturones, petos y arneses JAY ofrece soporte adicional al respaldo JAY Fit para aquellos casos con mayor necesidad de soporte postural.



### Reposacabezas Whitmyer®

Garantizan el soporte adecuado de la cabeza en sillas basculantes y en aquellos usuarios con necesidad de mayor soporte en el posicionamiento de la cabeza erguida para óptima funcionalidad.



### Soportes laterales

Multi-ajustables, Fijos o Abatibles. Con Almohadilla plana o curva.



### Cuñas de posicionamiento para alineación de columna vertebral

Soporte óptimo y confortable aumentando la tolerancia a la sedestación.

# Jay Zip / Pediátrico

## Características:

- Respaldo ligero, compuesto por una suave espuma de poliuretano que incrementa el confort.
- Diseñado antropométricamente teniendo en cuenta la anatomía del niño: contorno desde 2,5 a 6,3 cm, en función de la anchura
- 4 diferentes alturas para cubrir las necesidades de soporte de distintos usuarios
- Ajustable en ángulo de  $-20^{\circ}$  a  $+20^{\circ}$ , en profundidad hasta 7,5 cm y 2,5 cm en anchura
- Anclajes ligeros, compatibles con gran variedad de diámetros de tubo
- Accesorios de posicionamiento disponibles: arneses, reposacabezas, cinturones, cuñas, soportes laterales fijos y/o abatibles..
- Funda interior con tecnología Aquaguard™ y cosido especial en la cremallera para proteger la espuma de líquidos.
- Funda exterior con filamentos de plata incrustados en el tejido para inhibir la proliferación de bacterias (Tecnología X-static®) y material microclimático 3DX™ que favorece la ventilación y disipa el calor y la humedad.
- Opción de funda en color: rosa o azul



4 alturas disponibles en cada ancho : 15, 20, 25 o 30 cm

## Indicaciones clínicas:

- Usuarios pediátricos que precisan soporte postural posterior y necesidad de estabilidad lateral de leve a moderada
- Intervención clínica temprana para maximizar la capacidad funcional y el desarrollo del niño
- Optimiza la propulsión, protegiendo las extremidades superiores de lesiones por repetición
- Promueve la independencia del niño y confort.
- Su amplio rango de ajustes (en profundidad, altura, ángulo y ancho de la silla) optimiza el posicionamiento del usuario y la alineación de columna.

***“Diseñado para adaptarse a las necesidades específicas del usuario pediátrico”***



Fácil de instalar y retirar



Soportes abatibles con ajuste horizontal, en ángulo y rotacional.

## Tallas de respaldo JAY® Zip

| Altura<br>cm | Anchura |    |    |    |
|--------------|---------|----|----|----|
|              | 20      | 25 | 30 | 35 |
| 15           |         |    |    |    |
| 20           |         |    |    |    |
| 25           |         |    |    |    |
| 30           |         |    |    |    |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso máx. usuario | 75 kg  |
| Garantía          | 2 años |

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.

# Jay Care / Geriátrico

## Características:


- Espuma suave y con forma que se ajusta fácilmente a las prominencias óseas
- La espuma segmentada envuelve óptimamente la columna cifótica reduciendo los picos de presión, a la vez que proporciona comodidad y apoyo para las posturas cifóticas.
- Carcasa ajustable en ángulo, altura y profundidad para acomodación de deformidades y mejora del campo de visión.
- Ajuste de hasta 39° de inclinación
- Soporte firme, excelente estabilidad pélvica y soporte torácico.
- Funda resistente a la incontinencia



## Indicaciones clínicas:

- El diseño contorneado y ajuste de hasta 39° de inclinación se adapta a las necesidades del paciente geriátrico con columna cifótica estructurada
- Acomoda y da soporte a la cifosis torácica optimizando el campo visual, la deglución y el acceso a las ruedas para una movilidad eficiente.

***“Soporte y confort para personas mayores”***

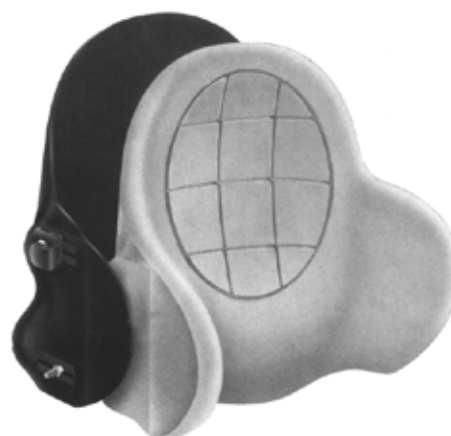

Carcasa ajustable y espuma con soporte lateral para una mayor estabilidad

## Tallas de respaldo JAY® Care

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| J 3500 B | Para sillas de 43 a 45 cm |
| J 3505 B | Para sillas de 38 a 40 cm |
| J 3502 B | Para sillas de 48 a 50 cm |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso máx. usuario | 113 kg |
| Garantía          | 2 años |

Para referencias, opciones y accesorios, tallas especiales o modificaciones por favor consulte la hoja de pedido.



# La importancia de un Sistema de Sedestación completo

Los beneficios de nuestra línea de respaldos Jay o de cualquier otro respaldo rígido sólo pueden ser completamente efectivos si se utilizan junto con el soporte pélvico adecuado. El cojín indicado para cada usuario irá en función de su necesidad de soporte para conseguir la estabilidad funcional necesaria en sedestación y de su necesidad de protección de la piel, minimizando la presión y las fuerzas de cizallamiento que se producen constantemente. Del mismo modo, los beneficios de nuestra gama de cojines pueden ser optimizados y maximizados en combinación con un soporte posterior adecuado a la espalda de cada usuario.

- **Cojín contorneado:** Estabiliza la pelvis desde abajo, ofreciendo soporte a las nalgas y redistribuyendo la carga a lo largo del fémur y trocánteres.
- **Respaldo rígido:** ofrece soporte firme a nivel pélvico posterior optimizando la función y el posicionamiento de la columna.



Un cojín con forma recoloca la pelvis en posición vertical evitando el deslizamiento. Combinado con un respaldo rígido, la columna recupera su posición óptima.

- **Reposacabezas:** El soporte de cabeza adecuado es clave cuando no hay control cefálico y solo puede ser garantizado si previamente tenemos el soporte óptimo a nivel de pelvis y tronco. (Ver catálogo Whimyer para soluciones de posicionamiento de cabeza)

Gracias a la posibilidad de customizar tanto el cojín como el respaldo, es posible dar solución a cada usuario de acuerdo a sus necesidades clínicas.

Además, la **adaptación de la silla de ruedas** de acuerdo a las formas y ángulos de cada usuario es clave para conseguir un equipo completo óptimo con el mejor rendimiento y respuesta al usuario.

Para más detalles visita: [www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)



Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



**Sunrise Medical S.L**

Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga

Vizcaya, España

Tel: 902 14 24 34

Fax: 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.es](http://www.SunriseMedical.es)



Rev.8- Noviembre 2018